

Spis treści:

1. Co to jest Aurimax i w jakim celu się go stosuje?
2. Ważne informacje przed zastosowaniem.
3. Jak stosować Aurimax?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać Aurimax?
6. Pozostałe informacje.

Skład: olej z oliwek oczyszczony, glicerol, kompleks kwasu glicyretynowego, totarol, olejek geraniowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek cytrynowy, olejek z oregano, olejek lawendowy, olejek miętowy, olejek z rozmarynu lekarskiego, wyciąg z gorknika kanadyjskiego.

1) Co to jest Aurimax i w jakim celu się go stosuje?

Aurimax jest to wyrób medyczny klasy I stosowany jako wilgotna bariera ochronna przed szkodliwymi wpływami środowiska, nawilżająca i kojąca skórę kanału słuchowego. Aurimax jest również zalecany w utrzymaniu higieny aparatu słuchowego ucha zewnętrznego dzieci i dorosłych.

Aurimax

- wspomaga leczenie zapaleń ucha,
- ogranicza obrzęk przewodu słuchowego i ma działanie ściągające,
- zmiękcza zalegająca woskowinę (dzięki czemu można ją łatwo usunąć) i zapobiega jej twardnieniu,
- wspomaga utrzymanie optymalnej wilgotności,
- pozwala utrzymać higienę uszu.

2) Ważne informacje przed zastosowaniem.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Wyrobu medycznego Aurimax nie należy stosować, jeśli:

- opakowanie zostało uszkodzone;
- występuje perforacja błony bębenkowej ucha (np. w przypadku przewlekłego zapalenia ucha środkowego);
- stwierdzono wcześniej uczulenie na którykolwiek ze składników wyrobu;
- upłynął termin ważności wydrukowany na opakowaniu;
- pacjent jest bezpośrednio po operacji lub zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w obrębie ucha.

Aurimax przeznaczony jest dla dzieci powyżej 24 miesiąca życia i dorosłych.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego, należy unikać kontaktu z oczami, jamą ustną i błoną śluzową gardła oraz nosa.

Stosowanie z innymi produktami leczniczymi/ wyrobami medycznymi



Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi/ wyrobami medycznymi. Po zastosowaniu spray'u nie zaleca się stosowania żadnych innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kropli do uszu przez okres co najmniej 30 minut.

3) Jak stosować Aurimax?


Przed pierwszym użyciem wstrząsać butelką przez co najmniej 5 sekund. Dzięki temu powstanie jednorodna zawiesina. Następnie 3-4-krotnie nacisnąć dozownik, do czasu aż nie dojdzie do uwolnienia spray'u (rysunek A). Podczas naciskania trzymać aplikator skierowany od siebie. Taka procedura przygotowuje system dawkowania do pierwszego użycia.

W celu osiągnięcia najlepszego wyniku należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

- Płynny spray do uszu Aurimax stosować wyłącznie wewnętrznie, miejscowo do ucha.
- Wstrząsać dokładnie buteleczką przez ok. 5 sekund, do czasu uzyskania jednorodnej zawiesiny.
- W celu użycia spray'u, delikatnie pociągnąć małżowinę uszną w górę i w tył (rysunek B).

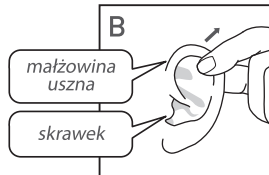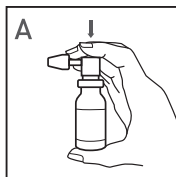

- Po wprowadzeniu aplikatora do ucha trzymać buteleczkę w pozycji pionowej i nacisnąć dozownik (rysunek C).
- Po aplikacji spray'u wymasować od zewnętrznej strony przednią część kanału słuchowego (skrawek).
- Taką samą procedurę powtórzyć w przypadku drugiego ucha.
- Po zastosowaniu zdjąć aplikator i przepłukać go gorącą wodą.
- Po wyschnięciu nałożyć końcówkę aplikatora na dozownik.

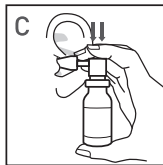

Dawkowanie

Utrzymanie prawidłowej higieny uszu

- Dzieci powyżej 24 miesiąca życia i dorośli: 1 dawka do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu.

Wspomaganie leczenia zapaleń ucha

- Dzieci powyżej 24 miesiąca życia do 12 roku życia: 1 dawka do każdego ucha 2-3 razy dziennie. Stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych! Jeśli po upływie 14 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 1 dawka do każdego ucha 3-4 razy dziennie. Jeśli po upływie 14 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Aurimax zawiera 200 pojedynczych dawek.

4) Możliwe działania niepożądane.

Wyrób medyczny Aurimax jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane po jego zastosowaniu. W razie wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy zgłosić lekarza lub farmaceutę. Wyrób medyczny Aurimax należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.

5) Jak przechowywać Aurimax?

Aurimax przechowywać:

- w suchym miejscu, w temperaturze od 15° C do 25° C w pozycji pionowej;
- chronić przed mrozem i nie przechowywać w lodówce;
- chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego;
- w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Po wykorzystaniu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6) Inne informacje:


Aurimax to wyrób medyczny I klasy.

Opakowanie


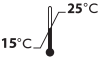







Pojemnik wielodawkowy o objętości 10 ml netto, zawierający 200 pojedynczych dawek. Pojemnik nie jest pod ciśnieniem. Obecność nierozpuszczonych cząstek to naturalna cecha produktu i nie oznacza jego wady.

 EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Józefa Piłsudskiego 11
05-510 Konstancin-Jeziorna, Poland

Dystrybutor w Polsce:

 **Chiesi Poland Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
tel.: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Wyjaśnienie zastosowanych symboli

	zajrzyj do instrukcji używania		ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania		numer serii
	wytwórca		chronić przed słońcem		zużyć do
	znak zgodności CE		nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone		ostrzeżenie

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 02/2021